



MASQUE DE PROTECTION «grand public» en tissu: 100% polyester, avec respirabilité suffisante et sans couture sagittale. Tissu répondant aux critères de la catégorie 2 des masques «grand public» (protection aux projections de 3 microns entre 70 % et 90%).

COMMENT BIEN PORTER SON MASQUE?



Évitez de le toucher et de le déplacer.



Avant de mettre ou enlever le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.



Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou le menton.



Pour le mettre : tenez le masque de chaque côté de l'élastique. Passez l'élastique derrière la tête. Ajustez le masque au niveau du nez et du menton avec l'élastique.



Ce masque n'est pas destiné aux personnels soignants ou aux malades.



Changez le masque : toutes les 4h. Pour boire, manger. S'il est humide. Si le masque est endommagé.



Pour l'enlever : attrapez le masque de chaque côté de l'élastique, pour le passer au dessus de votre visage.



OUI

L'élastique doit être placé sur le haut du crâne, les coutures doivent être mises vers l'extérieur.



NON

COMMENT ENTREtenir SON MASQUE?



Lavez le masque à la machine au moins 40 min à 40°. Ce masque est lavable et réutilisable 10 fois.

ATTENTION : ce masque ne remplace pas les gestes barrières